


LIGASANO®



KLIPPGUIDE FÖR TRYCKAVLASTNING MED POLYURETANSKUM

Favoriterna ur Ligameds klippguide

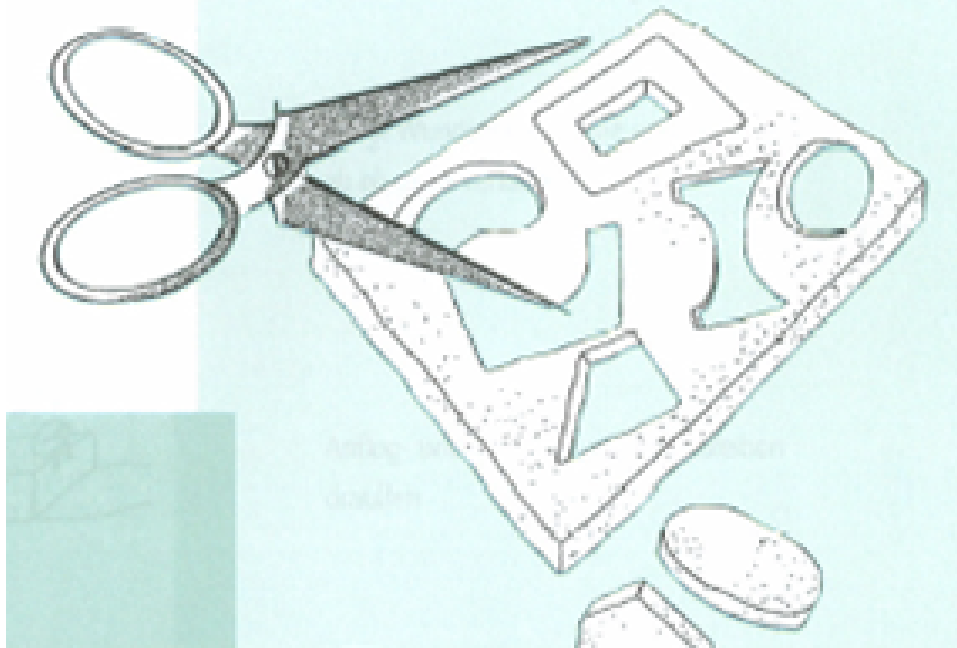

LIGASANO

är tillverkad i skummad polyuretan.

LIGASANO tryckavlastning (vit) finns i olika storlekar.

LIGASANO klimatplatta (grön) är en polyuretanplatta med större porer än den vita. Genom att porerna är större har den en grövre ytstruktur och en högre luftgenomsläpplighet. Viktigt att notera är att den gröna plattan aldrig får ligga närmast huden.

Vid tryckavlastning är det patientens vikt som avgör hur många plattor som ska användas.

Patientvikt	Tjocklek vid sacrum	Tjocklek vid häl
Under 45kg	2cm	1cm
Upp till 75kg	Minst 3cm	2cm
Över 75kg	Minst 4cm	3cm

Tvättinstruktion

LIGASANO tryckavlastning och klimatplatta tål värme upptill 121°C. vid upprepad tvättning bryts materialet successivt ner, vilket minskar produktens funktion. Produkten kan också steriliseras vid behov.

OBS! LIGASANO kan missfärgas av ljus.



Sortiment

Ligasano vit	59x49x1cm
	59x49x2cm
	200x100x1cm
	200x100x2cm
	200x50x2cm
	15x15x1cm
	15x15x2cm
	24x16x1cm
Ligasano grön	55x45x2cm

Klippguiden ger en vägledning till enklare och snabbare tryckavlastning i många varierande lägen.


LIGASANO tillverkas av LIGAMED medical Produkte GmbH och säljs i Sverige av HARTMANN-ScandiCare. Box 24 • 334 21 ANDERSTORP Tel 0371- 58 74 00 • Fax 0371- 58 74 44

Steg för steg: avlastning för händer

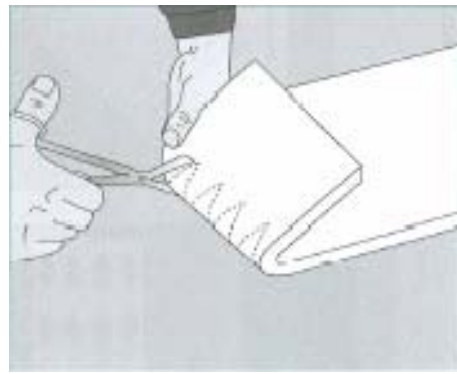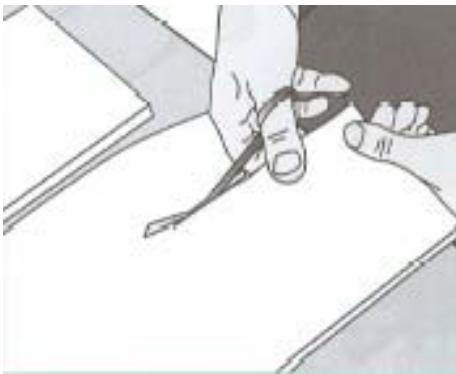

Material:
Ligasano vit 59 x 49 x 2cm

Steg för steg: avlastning för tår

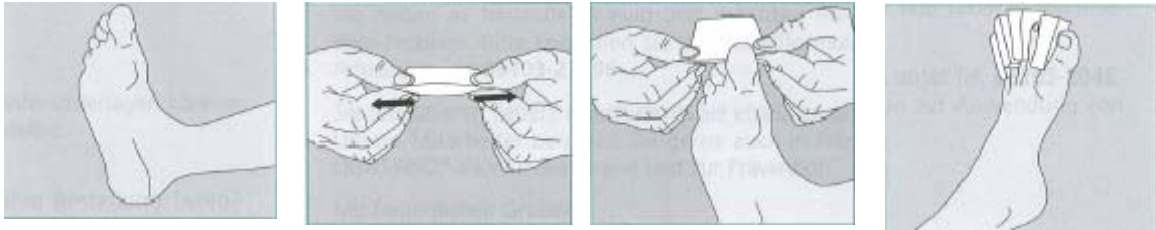


Armhåla



Bröst och buk






Mellan ben och lår

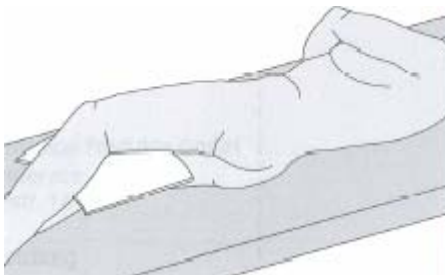

Mellan fingrar



Steg för steg: avlastning för häl

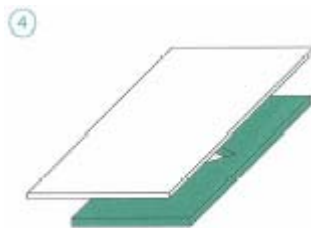
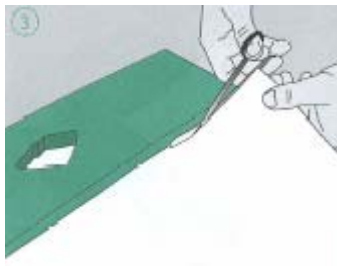
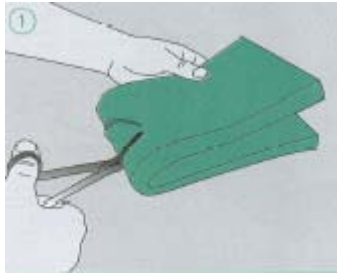


Material:

Ligasano vit 59 x 49 x 1cm

Ligasano grön 55 x 45 x 2cm

Steg för steg: avlastning för knä

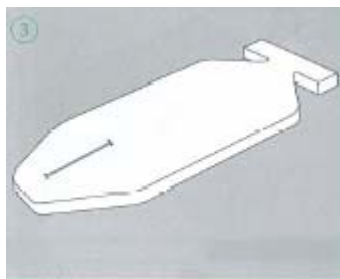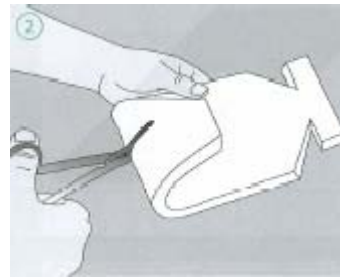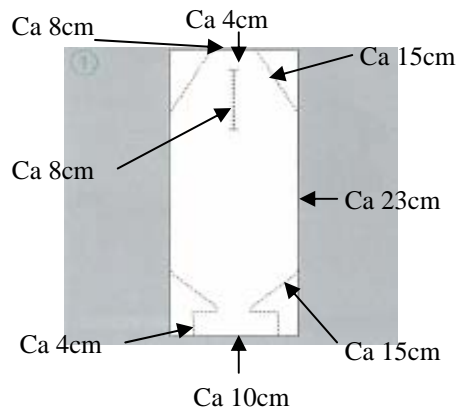

Material:
Ligasano vit 59 x 49 x 1cm