




Atrauman® Salvkompres

Vid såromläggningar finns en risk att sårbädden rivs upp gång på gång. Detta orsakar smärta som kan leda till ovilja hos patienten att byta förband. För att förhindra detta används Atrauman salvkompres som kan kombineras med flera olika typer av förband för att förhindra vidhäftning. Atrauman innehåller triglycerider som skyddar såret mot uttorkning samt skyddar sårets friska kanter. Salvkompresen tillåter, genom sitt finmaskiga nät, vätska att tränga igenom från såret upp i det sekundära förbandet.

Många användningsområden

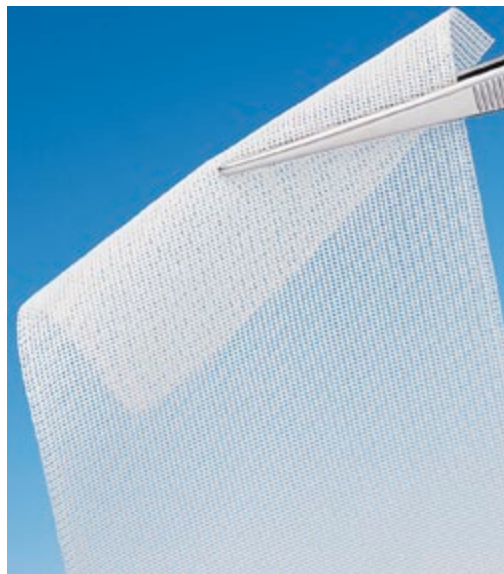

Skyddar sårkanterna

Förhindrar vidhäftning



Indikation

Till atraumatisk sårbehandling i sårläknin-
gens alla faser vid t.ex. skrapsår, bensår,
trycksår, brännskador, strålskador, abscesser,
hudtransplantationer och vid nagelextrak-
tioner.

Kontraindikationer:

Inga kända.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Atrauman är en salvkompress som stöder sårhäkning effektivt i alla dess faser.

Egenskaper

Den tunna mjuka väven av hydrofoba polyesterfibrer har en slät ytstruktur som förhindrar att nybildad vävnad växer in i kompressen. På så sätt motverkas tendensen att kompressen fastnar i såret. Inga salvrester lämnas kvar i såret vilket underlättar rengöring och bedömning av sårets tillstånd.

Atrauman håller sårytan och dess kanter smidiga och skyddar såret mot uttorkning. Salvmassan är gaspermeabel och genomsläpplig för exsudat. Detta gör att exsudat snabbt kan transporteras från såret. För att absorbera överflödigt exsudat bör ett absorptionsförband appliceras i kombination med Atrauman. Eftersom salvan saknar verksamma ämnen kan den även användas inom dermatologin, samt för läkemedelskänsliga och patienter med känslig hud. Terapeutiskt verksamma substanser kan tillsättas efter läkarens bedömning.

Atrauman bör bytas vid varje såromläggning om läkare ej ordinerar annat.

Material

Väv av hydrofob polyester, impregnerad med en salvmassa utan verksamma ämnen. Salvans innehåller: fettsyror (triglycerider) och kokosolja (Caprylic/Capric/Stearic Triglyceride; Bis-Diglycerol Polyacyladipate-2 (analog INCI)). Salvans är inte sensibiliserande och innehåller inga tillsatser av vaselin, lanolin eller paraffin.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Atrauman appliceras på ett skrapår.



Den finmaskiga nätstrukturen i Atrauman.

Tips

Eftersom Atrauman inte fäster mot huden kan det vara svårt att fixera den exempelvis på undersidan av benet. Enklaste sättet är att först lägga salvkompressen på det sekundära förbandet och därefter applicera båda mot såret.

Om inget sekundärt förband behövs kan salvkompressen exempelvis fixeras med en gasbinda.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Atrauman.	5 x 5 cm	499 510	10 st	20 Afp
Steril, enstycksförpackad	7,5 x 10 cm	499 513	10 st	10 Afp
	20 x 30 cm	499 515	10 st	3 Afp
	10 x 20 cm	499 536	30 st	10 Afp
	5 x 5 cm	499 550	50 st	10 Afp
	7,5 x 10 cm	499 553	50 st	10 Afp

Fördelar:

Lindrar smärta

Icke vidhäftande

Mjuk, patientkomfort

Ekonomisk

Skyddar såret

Många användningsområden

Vårdar sårkanterna