



# Cambren® C

## Antitrombosstrumpa

Cambren C är en antitrombosstrumpa av hög kvalitet. Med hjälp av strumpan kan en säker trombosprofylax utföras på immobila patienter utan stora vårdinsatser. Den ger steglös kompression som stadigt sjunker från vristen upp mot låret.

Cambren C ger steglös kompression som stadigt sjunker från vristen upp mot låret



Cambren C finns i 16 storlekar

Strumpan har en sluten tå med inspektionshål



### Indikation

För pre-, intra-, och postoperativ trombos- och emboliprofylax hos immobila patienter.

#### Kontraindikationer:

Venösa benåkommor som kräver medicinsk behandling, arteriella cirkulationsrubbingar, fixerade, lokala benåkommor t.ex. skador och hudsjukdomar liksom extrema benproportioner.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

### Egenskaper

Med Cambren C får man en steglös kompression som är kontinuerligt sjunkande från vristen upp mot låret. Tryckvärdet är ca 18 mmHg vid vristen och 6 mmHg vid låret. Trycket ser till att öka blodgenomströmningen hos immobila patienter och främjar återflödet av blod till hjärtat.

Strumpan har en sluten tå med inspektionshål. Varje strumpa har en märkning som tydligt visar storlekens vadmått. Hälen är stickad för att ge bästa möjliga passform.

De lårlånga storlekarna har ett elastiskt fixeringsband som förhindrar att strumpan rullar sig och kanar ner på låret.

De höftlånga strumporna har en ställbar elastisk knäppning runt midjan och en kil på insidan av varje ben för att uppnå bästa passform.

Cambren C finns i 16 storlekar vilket ger en stor möjlighet att hitta den optimala passformen och ge den bästa terapeutiska effekten för varje patient. Strumpan sitter tätt mot benet, bildar inga veck eller lämnar märken i huden.

Det finns två färgmarkeringar på strumpan, en vid kanten på inspektionshålet och en under fixeringsbandet, dessa är till för att enkelt kunna känna igen vilken storlek strumpan har. I tabellen nedan ser man vilka färgmarkeringar de olika strumporna har.

### Material

Materialet i Cambren C är genomsläppligt för luft och lämpligt även för patienter med känslig hud.

Cambren C är latexfri.

Strumporna är tillverkade av 82% Polyamid och 18% Elastan, och fixeringsbandet innehåller Polyamid, Elastane och Silikon.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass 1, osteril. CE-märkt enligt EU direktiv 93/42/EEC.

### Tvättråd

Cambren C kan både tvättas och kokas.

Sortiment	Art.nr	Storlek Tå	Vadmått Ovankant	Beninner- längd	Låromfång	Afp	Tfp
<b>Knälång</b>	997 394	K1	max 31 cm <input type="checkbox"/>			1 Par	15 Afp
	997 395	K2 <input type="checkbox"/>	31-38 cm <input type="checkbox"/>			1 Par	15 Afp
	997 396	K3	min 38 cm <input type="checkbox"/>			1 Par	15 Afp
<b>Lårlång</b>	997 397	SK1	max 31 cm	max 74 cm		1 Par	10 Afp
	SK= Lår liten	997 398	SK2	max 31 cm <input type="checkbox"/>	74-84 cm	1 Par	10 Afp
	997 399	SK3	max 31 cm	min 84 cm		1 Par	10 Afp
SM= Lår medium	997 400	SM1 <input type="checkbox"/>	31-38 cm	max 74 cm		1 Par	10 Afp
	997 401	SM2 <input type="checkbox"/>	31-38 cm <input type="checkbox"/>	74-84 cm		1 Par	10 Afp
	997 402	SM3 <input type="checkbox"/>	31-38 cm	min 84 cm		1 Par	10 Afp
SG= Lår stor	997 403	SG1	min 38 cm	max 74 cm		1 Par	10 Afp
	997 404	SG2	min 38 cm <input type="checkbox"/>	74-84 cm		1 Par	10 Afp
	997 405	SG3	min 38 cm	min 84 cm		1 Par	10 Afp
<b>Höftlång</b>	997 406	H1	max 31 cm	min 72 cm	max 64 cm	1 Par	10 Afp
	997 407	H2 <input type="checkbox"/>	31-38 cm	min 72 cm	max 64 cm	1 Par	10 Afp
	997 408	H3	min 38 cm	min 72 cm	max 64 cm	1 Par	10 Afp
	997 409	H4	min 38 cm	min 72 cm	64-82 cm	1 Par	10 Afp

### Fördelar:

Finns i 16 storlekar

Ger steglös kompression

Strumpan är latexfri

Snabb och enkel att använda

Hög användarkomfort