



Hydrofilm® plus

Transparent sårfilm med absorptionsdyna

Hydrofilm Plus är ett självhäftande transparent filmförband med en absorberande sårdyna som inte fastnar i såret. Exsudat absorberas snabbt och säkert vilket gör att såret hålls fritt från sårsekret som kan kontaminera såret. Tack vare dessa egenskaper möjliggör Hydrofilm plus effektiv sårvård samtidigt som den är hudvänlig och enkel att hantera.

Vattentät och ogenomtränglig för bakterier

Absorberande sårdyna



Andas



Indikation

Används som sterilt postoperativt och primärt förband, för att skydda lätt vätskande sår.

Kontraindikationer:

Hydrofilm plus ska inte användas på infekterade sår, kraftigt blödande sår eller sår med hög exsudatmängd.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Hydrofilm plus är en självhäftande, transparent sårfilm med en absorptionsdyna som inte fastnar i såret. Filmen består av tunn vattentät polyuretan som även står emot bakterier och virus. Förbandet andas och har en häftmassa som är dermatologiskt testad.

Egenskaper

Tack vare den tunna, transparenta filmen kan huden runt sårdynan inspekteras utan att förbandet behöver bytas. Genom den vita sårdynan syns också hur exsudat absorberas och när det är dags att byta förbandet. Dessa egenskaper gör att såret inte behöver störas i onödan under läkningsprocessen.

Eftersom Hydrofilm plus stänger ute både vatten och bakterier minimeras risken för sekundärinfektioner. Det fungerar också utmärkt att bära förbandet vid bad och dusch.

Filmen har en matt yta som inte reflekterar ljus, detta gör att filmen inte syns så väl.

Hörnen på Hydrofilm plus är rundade för att förbandet ska sitta stadigt på plats.

Häftförmågan i häftmassan är kraftig för att förbandet ska kunna sitta stadigt under en längre tid. Användningstiden avgörs av sårets status och typ.

Material

Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen häftmassa av akrylat. Absorptionsdyna av viskosfibrer täckt med ett polyetylen-nät. Kolofoniumfri.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Sortiment	Storlek	Sårdyna	Art.nr.	Afp	Tfp
Hydrofilm.plus	5 x 7,2 cm	2,5 x 4 cm	685 770	5 st	20 Afp
Steril, enstycksförpackad	9 x 10 cm	4 x 6 cm	685 772	5 st	20 Afp
	9 x 15 cm	4 x 11 cm	685 774	5 st	20 Afp
	10 x 20 cm	5 x 16 cm	685 777	5 st	10 Afp
	9 x 15 cm	4 x 11 cm	685 775	25 st	10 Afp
	10 x 12 cm	5 x 8 cm	685 776	25 st	10 Afp
	10 x 20 cm	5 x 16 cm	685 778	25 st	10 Afp
	10 x 25 cm	5 x 20 cm	685 779	25 st	10 Afp
	10 x 30 cm	5 x 25 cm	685 780	25 st	10 Afp
	5 x 7,2 cm	2,5 x 4 cm	685 771	50 st	10 Afp
	9 x 10 cm	4 x 6 cm	685 773	50 st	10 Afp



Filmen har en mycket tydlig fixeringsinstruktion. Genom att följa numreringen från 1-4 så kan förbandet fixeras på ett enkelt sätt.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering.

Fördelar:

Säkert sårskydd

Enkel hantering

Finns i 7 storlekar

Kolofoniumfri

Dermatologiskt testad