

Hydrosorb® Gel

Upprensande gel

Hydrosorb Gel är en klar trögflytande gel baserad på Ringer-lösning och glycerin. Gelen stöder en autolytisk rengöring av såret. Man kan säga att den stimulerar såret att rena sig självt genom att upprätthålla en fuktig miljö i såret. När gelen avlägsnas följer det upplösta exsudatet med. Hydrosorb Gel kan kombineras med alla typer av förband.



Indikation

För autolytisk rengöring av ytliga och djupa sår med låg exsudatmängd t.ex. bensår, trycksår och brännsår upp till grad 2b.

Kontraindikationer:

Försiktighet bör iaktas vid djupa sår med smala öppningar, typ fistlar, eftersom det kan vara svårt att få bort gelen.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Hydrosorb Gel är en klar, trögflytande gel baserad på Ringer-lösning och glycerin.

Egenskaper

Sprutan gör att doseringen blir perfekt, gelen appliceras direkt i såret utan kladd och i rätt mängd och på så sätt minimeras risken att något blir fel.

Hydrosorb Gel ger möjlighet till en snabb sårrengöring tack vare sin hydroaktiva effekt. Gelen kan kombineras med alla olika typer av förband och minimerar smärta vid förbandsbyten. Både den mängd gel som har applicerats i såret och den mängd som finns kvar i sprutan kan enkelt avläsas i de två skalorna på sprutan. Eftersom det är så enkelt att hantera sprutan och dosera rätt mängd är Hydrosorb Gel tidsbesparande. Till skillnad från tuber, där gelen har en tendens att stanna kvar i veck och kanter, kan sprutan med Hydrosorb Gel enkelt tömmas helt. Det är också enkelt att försluta sprutan om behandlingen av någon anledning blir avbruten.

Material

Gelformande: Hydroxyethylcellulosa (HEC), Carboxymethylcellulosa (CMC), Carbomer (förtjockningsmedel, syntetisk polymer).

Vätska: Ringer-lösning

Mjuktgörare: Glycerin

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.



Gelen plockas ur såret.

Tips

Vid användande av gelen måste såret täckas med ett 5 mm tjockt lager gel och ett passande täckförband.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Hydrosorb® gel	8 g	900 843	5 st	10 Afp
Steril, enstycksförpackad	15 g	900 844	10 st	10 Afp

Fördelar:

Säker dosering

Flexibel och smärtfri

Underlättar dokumentation

Enkel hantering, sparar tid

Ekonomisk