



Idealast®

Lågelastisk kompressionsbinda

Idealast har samma egenskaper som en lågelastisk kompressionsbinda men skiljer sig genom att den inte förlorar sin elasticitet under användning. Detta gör att Idealast kan användas för många olika ändamål och har ett högt ekonomiskt värde eftersom bindan kan återanvändas flera gånger.

Förlorar inte sin elasticitet
under användning



Bekväm att bära

Öppen vävstruktur som
släpper igenom luft

Indikation

För måttlig kompression vid profylax och uppföljning av venösa problem eller som stöd/avlastning vid muskel- och ledbandsskador. För fixering av förband och gipsskenor. Sportbandage.

Kontraindikationer:

Arteriell ocklusionssjukdom.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Idealast är en permanentelastisk binda med stadiga kanter.

Egenskaper

Permanentelastiken innebär att bindan inte förlora sin elasticitet under användning. Bindan ger ett högt arbetstryck och ett lågt vilotryck vilket gör att den även kan bäras av stillasittande personer. Normalt tas bindan av under natten och lindas på igen på morgonen. För att nå bästa resultat bör framför allt smala ben polstras till normal form innan lindning.



Förpackad i cellofan.

Material

69% bomull, 31% polyamid. Vit.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 5 m

Outsträckt längd: ca 2,8 m

Elasticitet: 80%

Tvättråd

Idealast kan steriliseras i autoklav vid 134°C och tvättas i 60°C ett fåtal gånger.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealast.	5 m x 6 cm	931 153	1 st	70 Afp
Styckförpackade i ask	5 m x 8 cm	931 154	1 st	55 Afp
	5 m x 10 cm	931 155	1 st	60 Afp
	5 m x 12 cm	931 156	1 st	50 Afp
	5 m x 20 cm	931 158	1 st	30 Afp

Fördelar:

Bekväm att bära

Permanentelastisk

Många användningsområden

Kan återanvändas

Kraftig

Stadiga kanter