

# Idealhaft®

## Kohesiv lågelastisk kompressionsbinda

Idealhaft är en beige, kohesiv, lågelastisk kompressionsbinda. Bindan möjliggör en enkel applicering som ger ett högt arbetstryck vilket leder till att både det ytliga och djupa vensystemet påverkas.

Häftar i sig själv utan att fastna i hud och hår



Bekväm att bära

Öppen vävstruktur som släpper igenom luft



### Indikation

För kraftig kompression vid kroniska venösa ödem, utläkta bensår, tromboflebit eller som stöd vid amputationer, muskel- och ledbandsskador. För fixering av förband och gipsskenor. Sportbandage.

#### Kontraindikationer:

Arteriell ocklusionssjukdom.  
Överkänslighet mot latex.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Idealhaft är en kraftig, elastisk binda med stadiga kanter.

### Egenskaper

Bindan är belagd med latex och häftar i sig själv, den fastnar däremot inte på hud, hår eller kläder. Strukturen i produkten gör att den inte kasar ner. Den öppna vävstrukturen i bindan tillåter att luft släpps igenom och på så sätt reduceras risken för maceration av huden. Idealhaft är enkel att applicera eftersom den är mjuk och följsam. Är bindan för lång går det utmärkt att klippa av den utan att kanterna repar upp sig. Idealhaft kan sitta kvar vid röntgenundersökningar då den inte hindrar strålningen. Normalt tas bindan av under natten och lindas på igen på morgonen. För att nå bästa resultat bör framför allt smala ben polstras till normal form innan lindning.

### Material

100% bomull. Latexbelagd.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Utsträckt längd: 5 m

Outsträckt längd: ca 3,1 m

Elasticitet: 60%

Idealhaft kan steriliseras i autoklav vid 134°C.



Enkel att applicera.

### Tips

Spara rullen som bindan sitter på och linda tillbaka den använda bindan så blir det enkelt att applicera igen.

Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Idealhaft®</b>	5 m x 6 cm	931 693	1 st	60 Afp
Styckförpackade i ask	5 m x 8 cm	931 694	1 st	40 Afp
	5 m x 10 cm	931 695	1 st	40 Afp
	5 m x 12 cm	931 696	1 st	30 Afp

### Fördelar:

Bekväm att bära

Ingen ytterligare fixering krävs

Många användningsområden

Släpper igenom luft

Kraftig

Kan återanvändas