



# Lastogrip®

## Elastiskt tubbandage

Lastogrip är ett kraftigt vitt tubbandage. Lastogrip fixeras snabbt och enkelt utan ytterligare hjälpmedel. Bandaget kan tas bort och sättas på plats igen eftersom det behåller sin elasticitet. Ger kompression som en medelelastisk binda men med jämn tryckverkan.

Lastogrip kan tvättas  
och steriliseras



Elasticitet: 330%

Enkel och snabb att applicera

### Indikation

För förbandsfixering där även kompression behövs t.ex. vid thorax- och bukkirurgi, efter bröstoperationer samt som täckande skyddsförband.

Kompression t.ex. vid ödem.

Stöd och avlastning vid muskel- och skelettskador. Stödbinda med värmande effekt vid artros.

#### Kontraindikationer:

Innehåller latex, bör ej användas av personer med överkänslighet.



HARTMANN

helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP  
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45  
E-post [info@hartmann.se](mailto:info@hartmann.se)

Besök oss på vår hemsida:  
[www.hartmann.se](http://www.hartmann.se)

Lastogrip är ett kraftigt tubbandage som både ger stöd och kan fixera andra förband.

### Egenskaper

Lastogrip är ett elastiskt tubbandage med enkel applicering, ingen ytterligare fixering krävs. Bandaget sitter säkert på plats utan att glida. Det tryck som Lastogrip avger motsvarar en medelkraftig kompression. Eventuella sårskador kan enkelt undersökas genom att tubbandaget viks bort. Det kan sedan vikas tillbaka. Tubbandaget består av en hög andel bomull som gör det bekvämt att bära samtidigt som det är hudvänligt.

### Material

82% bomull, 10% viskos, 8% polyamid. Innehåller latex.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Elasticitet: 330%

### Tvättråd

Lastogrip kan tvättas i 60°C och steriliseras i autoklav vid 134°C.



Lastogrip placerad över knä.

Sortiment	Benämning	Storlek	Funktionsmått	Art.nr.	Afp	Tfp
<b>Lastogrip®</b>	A	10 m x 4,2 cm	Barnhand/arm/fot	932 170	1 st	11 Afp
Styckförpackade i ask	B	10 m x 6,25 cm	Liten hand/arm/fot	932 171	1 st	8 Afp
	C	10 m x 6,75 cm	Medium hand/arm/fot/underben	932 172	1 st	7 Afp
	D	10 m x 7,5 cm	Stor hand/arm/fot/underben	932 173	1 st	7 Afp
	E	10 m x 8,75 cm	Ben/stora armar/smala lår	932 174	1 st	6 Afp
	F	10 m x 10 cm	Lår/ben	932 175	1 st	5 Afp
	G	10 m x 12 cm	Stora lår	932 176	1 st	4 Afp
	J	10 m x 17,5 cm	Liten bål	932 177	1 st	3 Afp
	K	10 m x 21,5 cm	Medium bål	932 178	1 st	4 Afp
	L	10 m x 32,5 cm	Stor bål	932 179	1 st	3 Afp
	M	10 m x 37,5 cm	Extra stor bål	932 180	1 st	2 Afp

## Fördelar:

Sitter säkert

Enkel att hantera

Många användningsområden

Kan tvättas och steriliseras