


PermaFoam® / PermaFoam® comfort

Polyuretanskumförband med specialformer

PermaFoam är framtaget för att användas i upprepningsfasen och den tidiga granulationsfasen i sårhäkning. Problem uppstår om dessa faser blir för långa och exsudatet, som från början påskyndade sårhäkningen, börjar ge motsatt effekt och orsakar skador på huden runt såret och motverkar läkningsprocessen.

En bra exsudathandling måste säkerställa att överskottet av exsudat leds bort från såret. Det är också viktigt att förbandsbyten inte blir för täta och stör sårhäkningen, då detta kan leda till en förnyad bakteriekontaminering.

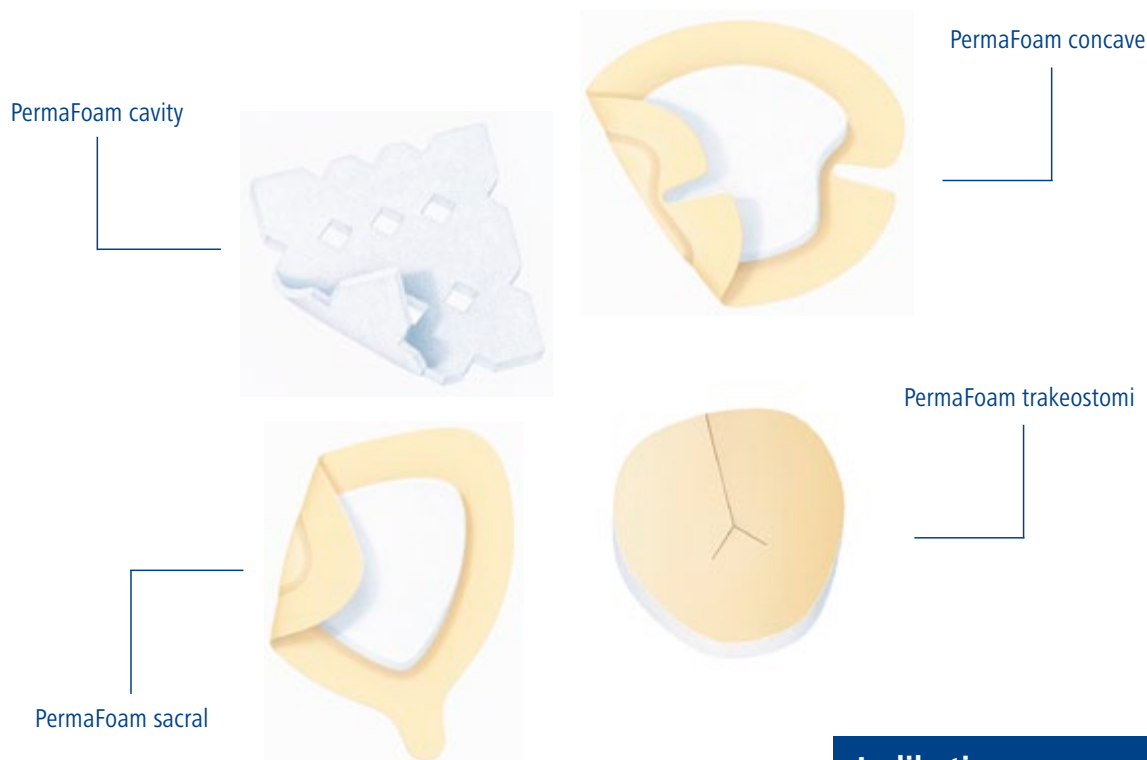

Indikation

För upprepning och stimulering av den tidiga granulationen. Vid behandling av måttligt till rikligt vätskande sår, t.ex. bensår och trycksår. Vid venösa bensår i kombination med kompression. Brännskador.

Kontraindikationer:

Permafoam och Permafoam comfort får inte användas på områden med frilagda ben, muskler och senor, vid kliniskt infekterade sår, svampinfektioner eller brännskador av graden 2b och 3.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

PermaFoam är ett mjukt och behagligt skumförband med mycket god vertikal absorptionsförmåga och ett semipermeabelt ytskikt som bibehåller en fuktig sårmiljö.

Egenskaper

Förbandet finns i två versioner, med eller utan häftkant. Versionen med häftkant har tilläggsnamnet Comfort.

Stora öppna porer (400-1000 µm) mot sårytan ger hög absorptionskapacitet av större partiklar, såsom bakterier, cellrester och trögflytande exsudat. Bakterier har en storlek på 1-5 µm. Det semipermeabla ytskiktet består av små, slutna polyuretanporer.

Den gradvisa porförminskningen minimerar risken för maceration genom att absorberat exsudat hålls kvar högt upp i förbandet.

Det mjuka materialet minskar risken för att förbandet skall fastna i sårbedden och gör förbandsbyten smärtfria.

Den vertikala absorptionen förhindrar spridning av absorberat exsudat i sidled och förbandet används därför med fördel under kompression (testad upp till 42 mmHg).

Material

Förbandet består av Polyuretan. PermaFoam comfort har en akrylat-baserad häftmassa.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.




PermaFoam trakeostomi fungerar polstrande och uppsugande vid trakeostomi. Fixeras enklast med tejp t.ex. Omniplast.



PermaFoam concave med häftkant för enkel fixering på häl och armbåge. Om häftkant inte kan användas fungerar det att använda en tillklippt standardplatta.



PermaFoam sacral används för sår i det sakrala området. Framför allt kraftigt vätskande trycksår. PermaFoam sacral har häftkant.

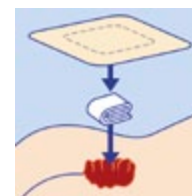

PermaFoam cavity är helt utan spärrskikt och används ihopvikt i djupa sårhålur och kaviteter, gärna i kombination med PermaFoam comfort.

Särskilda upplysningar

PermaFoam och PermaFoam comfort får inte användas samtidigt med oxidationsmedel som t.ex. hypokloridlösningar eller vätesuperoxid, eftersom skummet då kan skadas.

Om det finns behov för användning av oxidationsmedel kan såret spolras med Ringer-lösning eller saltlösning efter behandling. Därefter kan PermaFoam appliceras.

| Sortiment | Storlek | Sårdyna | Art.nr. | Afp | Tfp |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------|-------|--------|
| PermaFoam. | | | | | |
| Steril, enstycksförpackad | | | | | |
| PermaFoam. cavity | 10 x 10 cm | | 409 425 | 3 st | 12 Afp |
| PermaFoam. trakeostomi | 8 x 8 cm | | 409 426 | 10 st | 6 Afp |
| PermaFoam. comfort | | | | | |
| Steril, enstycksförpackad | | | | | |
| PermaFoam. sacral | 18 x 18 cm | 11 x 9,5 cm | 409 422 | 3 st | 6 Afp |
| | 22 x 22 cm | 14,5 x 12,5 cm | 409 423 | 3 st | 6 Afp |
| PermaFoam. concave | 16,5 x 18 cm | 10,5 x 12 cm | 409 424 | 3 st | 6 Afp |

Fördelar:

Hög absorptionskapacitet

Enkel hantering

Mjuk, patientkomfort

Ekonomisk

Skyddar såret

Många former