

Pütterbinde®

Lågelastisk kompressionsbinda

Kompression är många gånger en förutsättning för att ett sår ska läka. För en kraftig kompression med högt arbetstryck och lågt vilotryck används med fördel Pütterbinde. Den kraftiga väven ger kompression även om svullnaden i benet minskar något i omfång.

Ger kraftig kompression
med högt arbetstryck och
lågt vilotryck



Kan tvättas i 95°C

Fungerar oberoende av
vilken lindningsteknik
du vill använda



Indikation

Vid alla akuta och kroniska venösa ödem, venösa bensår och tromboflebit. Efter injektionsbehandling av åderbräck.

Kontraindikationer:

Arteriell ocklusionssjukdom.
Bensår med arteriellt ursprung.
Används ej till sängliggande och rullstolsburna patienter. Endast till uppegående patienter eftersom det krävs muskelarbete för att förbättra det venösa återflödet och för att lindningen ska ha effekt.



helps healing.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24 • 334 21 ANDERSTORP
Tel 0371-58 74 00 • Fax 0371-58 74 45
E-post info@hartmann.se

Besök oss på vår hemsida:
www.hartmann.se

Pütterbindans starka väv ger en kraftig kompression med högt arbetstryck och lågt vilotryck.

Egenskaper

Den starka vävskvaliteten gör det möjligt att lägga utomordentligt hållbara förband med varaktig kompressionsverkan. Eftersom bindor med kort sträckbarhet dessutom anpassar sig bra till benomfångets förändringar när ödemen går tillbaka, kan de sitta kvar i ungefär 3 dagar utom vid för kraftiga svullnader där benets omfång minskar och bindorna riskerar att kasa ner.

Material

100% bomull. Bindan är helt latexfri.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Pütterbinde kan steriliseras i autoklav vid 134°C.

Utsträckt längd: 5 m

Outsträckt längd: ca 2,6 m

Elasticitet: 90%

Tvättråd

Pütterbinde kan tvättas i 95°C upp till 15 gånger. För att göra bindans livslängd så lång som möjligt ska den torkas plant efter tvätt, och lindas hårt när den inte används.

Alla bindor är märkta med tvättråd och produktnamn i båda ändar.



Sortiment	Storlek	Art.nr.	Afp	Tfp
Pütterbinde.	5 m x 6 cm	931 806	10 st	8 Afp
lösa i ask	5 m x 8 cm	931 814	10 st	8 Afp
	5 m x 10 cm	931 815	10 st	8 Afp
	5 m x 12 cm	931 816	10 st	8 Afp



Tips

En lindningsinstruktion medföljer i alla förpackningar, men kan även beställas separat.

Bästa tiden att linda är på morgonen. Polstra för bästa effekt.

Uppmana patienten att röra på fötterna vid stillasittande.

Obs! använd inte förbandsklämman runt produkten för att fixera bindan på patienten, den finns bara med i förpackningen för att hålla ihop bindan under transporten.

Fördelar:

Märkt med tvättråd

Märkt med produktnamn

God hållbarhet

Släpper igenom luft

Latexfri